


トラックケア (新生児・小児用) Y型の使用方法

ΔVΔNOS

内容: 198-4J (カテーテル径8Fr/2.67mm)の場合

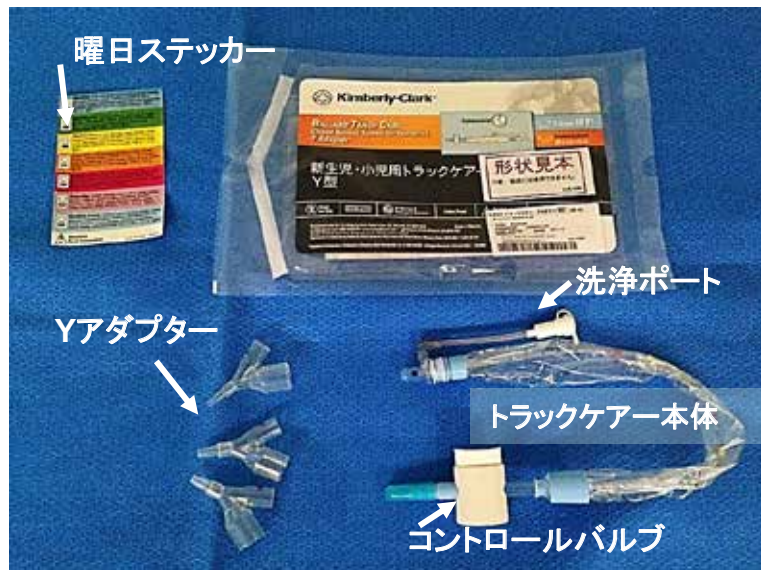

ご使用前に必ずお読みください。

- トラックケアを24時間より長く使用しないでください。
- 患者ごとに交換し、再使用しないでください。
- 吸引圧設定: 専門家の推奨値は、
-100mmHg (-13.3kPa) 以下です。
- 1回の吸引の全行程は、5~10秒以内で行ってください。

《気管チューブYアダプターについて》

5Fr : 2.0、2.5mmの2種類が入っています。


6Fr : 2.5、3.0、3.5mmの3種類が入っています。

7Fr : 3.0、3.5、4.0mmの3種類が入っています。

8Fr : 3.0、3.5、4.0mmの3種類が入っています。

※本書は本品の使用方法を簡易的に説明したもので、使用方法の詳細や使用上の注意等は説明しておりません。本品使用に際しては、必ず製品に添付された添付文書をお読みください。


セットアップの方法

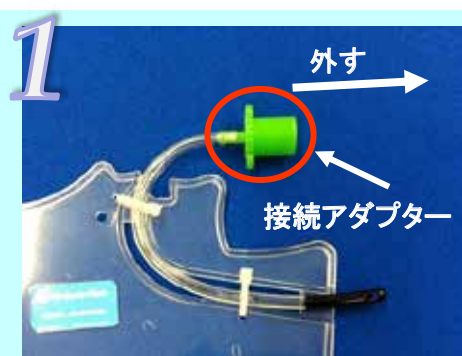

1. 気管チューブに接続されている、呼吸器回路との接続アダプターを外してください。



2. 患者の気管チューブと同じサイズのYアダプターを選びます。(残りは廃棄してください。)

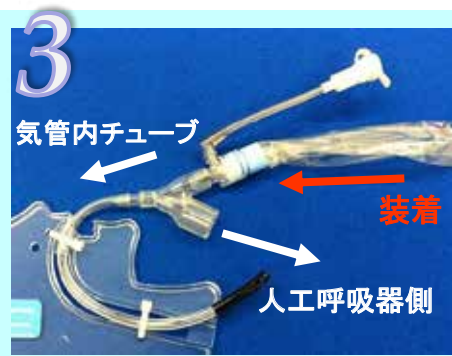

3. トラックケア本体に選んだYアダプターを装着し、上記のように呼吸器回路及び気管チューブに接続してください。



4. コントロールバルブに交換する曜日のステッカーを貼ってください。予備用キャップを別途ご用意しております。必要に応じてご使用ください。



5. 開封時のコントロールバルブはロックされていません。白いボタンを180度回転させて、コントロールバルブをロックしてください。



6. セットアップは完了です。

操作方法



1. トラッキングケア本体と吸引源からのチューブを接続します。



2. コントロールバルブのロックを解除します。



3. 片手で気管チューブとトラッキングケア本体を持ち、もう一方の手でカテーテルを挿入します。



4. 必要な深さまでカテーテルを挿入したら、コントロールバルブを押します。コントロールバルブを押したまま、カテーテルを引いてください。

※カテーテルの挿入深度については、別紙をご参照ください。



5. 上記の写真の矢印のところに黒いマーカが見えたら、カテーテルを引くことを止めてください。



6. 吸引が終わったら、洗浄ポートに洗浄液(ウェットパックもしくはシリンジ)を取り付け、2~3cc程度を目安にコントロールバルブを数回押しながら注入し、カテーテルの洗浄を行います。コントロールバルブを押さずに(十分な陰圧がかかっていない状態で)洗浄液を注入すると、患者側に垂れ込む可能性があります。カテーテル洗浄液は必ずコントロールバルブを押しながら行ってください。



7. 洗浄終了後、コントロールバルブをロックします。



8. トラッキングケア本体より吸引源からのチューブを外し、キャップを取り付けます。



9. 吸引完了です。

※詳細は製品に添付されて添付文書をご確認ください。
医療機器認証番号：225ADBZX00161000
販売名：KimVent トラッキングケア プロダクツ

製造販売元：アバノス・メディカル・ジャパン・インク
〒220-8115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー
製品に関するお問い合わせ：FreeCall 0800-100-5100

AVANOS

www.avanos.jp

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.

©2019 AVNS. All rights reserved.

19DMKT36-T