

トラックケア（新生児・小児用） エルボー型の使用法

ΔVΔNOS

内容：208-4J（カテーテル径8Fr／2.67mm）の場合



ご使用前に必ずお読みください。

- トラックケアを24時間より長く使用しないでください。
- 患者ごとに交換し、再使用しないでください。
- 吸引圧設定：専門家の推奨値は、
－100mmHg（－13.3kPa）以下です。
- 1回の吸引の全行程を、5～10秒以内で行ってください。

《気管チューブアダプターについて》

5Fr：2.0、2.5mmの2種類が入っています。

6Fr：2.5、3.0、3.5mmの3種類が入っています。

7Fr：3.0、3.5、4.0mmの3種類が入っています。

8Fr：3.0、3.5、4.0mmの3種類が入っています。

※本書は本品の使用法を簡易的に説明したもので、
使用法の詳細や使用上の注意等は説明しておりませ
ん。本品使用に際しては、必ず製品に添付された添付
文書をお読みください。

セットアップの方法



1. 気管チューブに接続されている、
呼吸器回路との接続アダプターを
外してください。（**気管チューブの接
続アダプターに直接トラックケア
本体を装着する場合は3.以降の
手順を行ってください。**）



2. 患者の気管チューブと同じサイズの
気管チューブアダプターを選びます。
（残りは廃棄してください。）



3. トラックケア本体に選んだ気管
チューブアダプターを装着し、上記の
ように呼吸器回路及び気管チューブに接
続してください。



4. コントロールバルブに交換する
曜日のステッカーを貼ってください。
予備用キャップを別途ご用意してお
ります。必要に応じてご使用ください。



5. 開封時のコントロールバルブはロ
ックされていません。白いボタンを180度
回転させて、コントロールバルブをロ
ックしてください。



6. セットアップは完了です。

操作方法

1



1. コントロールバルブのキャップを外し、トラックケア本体に吸引源からのチューブを接続します。

2



2. コントロールバルブのロックを解除します。

3



3. 片手でトラックケア接続部を支え、もう一方の手でカテーテルを挿入していきます。


4



4. 必要な深さまでカテーテルを挿入したらコントロールバルブを押します。コントロールバルブを押したまま、カテーテルを引いてください。

※カテーテルの挿入深度については、別紙をご参照ください。

5

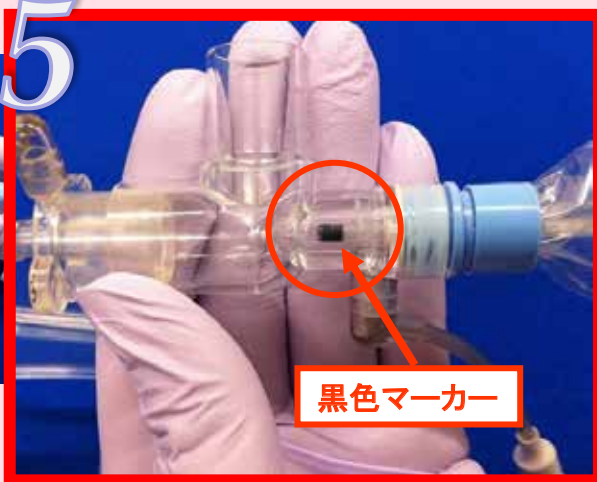

5. 上記の写真の矢印のところに黒いマーカーが見えたら、カテーテルを引くことを止めてください。

6



6. 吸引が終わったら、洗浄ポートに洗浄液(ウェットパックもしくはシリンジ)を取り付け、2~3cc程度を目安にコントロールバルブを数回押しながら注入し、カテーテルの洗浄を行います。コントロールバルブを押さずに(十分な陰圧がかかっていない状態で)洗浄液を注入すると、患者側に垂れ込む可能性があります。カテーテル洗浄液は必ずコントロールバルブを押しながら行ってください。

7



7. 洗浄終了後、コントロールバルブをロックします。

8



8. トラックケア本体から吸引源からのチューブを外し、キャップを取り付けます。

9



9. 吸引完了です。

※詳細は製品に添付されて添付文書をご確認ください。
医療機器認証番号：225ADBZX00161000
販売名：KimVent トラックケア プロダクト

製造販売元：アバノス・メディカル・ジャパン・インク
〒220-8115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー
製品に関するお問い合わせ：FreeCall 0800-100-5100

AVANOS

www.avanos.jp

*Registered Trademark or Trademark of Avanos Medical, Inc., or its affiliates.
©2019 AVNS. All rights reserved.

19DMKT37-T